

FX 胫腓骨踝部骨折固定支具

—— DARCO FXPro[®] Walker



1. 底部的低轮廓设计消除了和一般鞋品之间的高度差，使穿戴者无需改变步态
2. 填充垫层促进了支具内的空气流通性，使人体的下肢保持清爽和舒适
3. 符合解剖学原理的压舌板和鍍具舒适地固定了人体的踝关节
4. 带有吸震功能的鞋垫能按足底塑形

DARCO



产品使用说明

1. 解开扣带，从支具中拿出软护套；
2. 将腿包入软护套中，并借由护套上的雌雄条扣住；
3. 掰开支具两侧的夹板，将包裹了软护套的腿放入支具中；
4. 放入后将两边夹板内侧的白色封条撕下并使其粘紧软护套，合上扣带（顺序为从低到高），调节腿部至松紧适中。

产品使用须知：

1. 在使用期间请尽量避免开车；
2. 当您爬楼梯、上下人行台阶或是行走在崎岖的路面上时，请加倍小心；
3. 请放慢你的脚步，以适应特殊鞋具带来的不便；
4. 请在专业人士的指导下使用本产品，一旦发生诸如疼痛，肿胀或皮肤刺激等情况，请立即与您的医生取得联系。

适应症：

本产品适用于稳定的踝部骨折、胫腓骨骨折，并且重量较轻可以代替石膏固定；

足腿部各部分的固定压力经扣带系统调节，可免除因受伤带来的足腿部消肿而要更换石膏的烦恼；

该产品可用于踝部韧带的康复。

产品有普通和低筒两种样式：

| 货号 | 颜色 | 规格 | 尺码（足底长） |
|-----|----|----|---------|
| FX0 | 黑色 | XS | 订制 |
| FX1 | 黑色 | S | 25 厘米 |
| FX2 | 黑色 | M | 28 厘米 |
| FX3 | 黑色 | L | 30 厘米 |
| FX4 | 黑色 | XL | 订制 |