

踝关节骨折固定支具 使用指南

强力推荐——可配穿袜子的绑脚

1

在使用本产品前请先检查夹板的位置，标注 **INSIDE** 的硬质板配合内侧踝，标注 **OUTSIDE** 的硬质板配合外侧踝，该硬质板可作任意调节以匹配左右踝关节。



Medial — 踝关节内侧



Lateral — 踝关节外侧

2



拉开绑脚后侧，由此将脚滑入支具后，关上后侧雌雄扣以闭合绑脚。

3



抓起低处的扣带，调节到适合的长度后，将扣带向后拉以裹住踝部，并最终在后侧固定。

4



收紧中央上侧的扣带并裹住上部踝关节以固定。

完善的绑带系统使得调节变得异常简单且不用费力脱鞋调整。通过简易的调节收紧达到不同个体所需的紧致度和舒适度。



支具中另附背面有粘性的泡沫块，该泡沫块能任意裁剪以粘附在硬质板上，以满足舒适的要求。



清洁须知

- 清洗前须抽掉硬质板。
- 本产品可以机洗，但须使用柔和的洗洁剂及温水。
- 在机洗时为了避免绑脚扣带损伤到其他衣物，您可在洗前将绑脚放入特制的洗涤包中或者分开洗涤。
- 除水后置于通风处晾干。

使用禁忌；不要固定过紧 — 这可能导致踝关节处血液循环受阻。如果在使用时感到任何的疼痛，或是发现异常肿胀及皮肤刺激，请立即停止使用并联系你的供货商。

达科 踝关节骨折固定支具由达科公司品质保障，荣誉出品。

本产品不含乳胶。

中国制造

DARCO

沪闵路 3458 弄 128 号 | 上海市闵行区 | 中国
021-64892863 | www.darco-china.com.cn