

气压胫腓骨踝部骨折固定支具

—— DARCO AirTraveler™ Walker



1. 环形充气气囊
2. 与踝部吻合固定
3. 气囊的前后一体化控制达到最佳的固定效果
4. 侧面的低轮廓设计
5. 鞋底高度胶底运动鞋接近
6. 在同类产品中最轻盈
7. 弧形鞋底的独特设计
8. 在外形轮廓上如同马镫般的设计
9. 使用解剖学原理舒适地固定你的下肢和踝部

DARCO

注：实际产品为蓝色可充气软护套，而不是下图中的黑色软护套



产品使用说明

1. 解开扣带，从支具中拿出软护套；
2. 将腿包入软护套中，并借由护套上的雌雄条扣住；
3. 掰开支具两侧的夹板，将包裹了软护套的腿放入支具中；
4. 放入后将两边夹板内侧的白色封条撕下并使其粘紧软护套，合上扣带（顺序为从低到高），调节腿部至松紧适中；
5. 使用充气囊（如右图）的白色端插入可充气软护套上端的导气管进行充气，以软护套膨胀到刚好能固定住足踝部位不使其移动为准，被可充气软护套包裹的足踝一旦感到刺痛、灼伤或麻木，请立即使用充气囊的黑色端插入导气管进行放气减压，如果不适感不能因此缓解，马上联系您的医生。



产品使用须知：

1. 在使用期间请尽量避免开车；
2. 当您爬楼梯、上下人行台阶或是行走在崎岖的路面上时，请加倍小心；
3. 请放慢你的脚步，以适应特殊鞋具带来的不便；
4. 请在专业人士的指导下使用本产品，一旦发生诸如疼痛，肿胀或皮肤刺激等情况，请立即与您的医生取得联系；
5. 给可充气护套加气时，切忌充气过量，以免压迫腿部从而造成血液循环障碍。

适应症：

本产品适用于稳定的踝部骨折、胫腓骨骨折，并且重量较轻可以代替石膏固定；

足腿部各部分的固定压力均由可充气护套进行调节，可免除因受伤带来的足腿部消肿而要更换石膏的烦恼；

该产品可用于踝部韧带的康复。

产品有高筒和低筒两种样式：

货号	外观	规格	尺码（足底长）
AT0	黑色支架 蓝色衬里	XS	订制
AT1	黑色支架 蓝色衬里	S	25 厘米
AT2	黑色支架 蓝色衬里	M	28 厘米
AT3	黑色支架 蓝色衬里	L	30 厘米
AT4	黑色支架 蓝色衬里	XL	订制