

# 胫腓骨踝部骨折固定支具

—— DARCO Body Armor® Walker II



1. 可调节扣固定，可按腿的粗细调节，达到最佳固定
2. 可更换鞋垫以满足从足部溃疡，骨折到减轻压力等多方面的需求
3. 弧形鞋底的设计模拟正常步态
4. 具有吸汗功效的衬垫
5. 可弯曲外壳的设计方便使用
6. 包含 5 种尺码的高低两款产品任您选择

—— 适用于稳定的踝部骨折、胫腓骨骨折 ——

**DARCO**



## 产品使用说明

1. 解开支具上的所有搭扣，然后拿走前端护板；
2. 撑开支具外壳，将足部放入支具中，此时切记先让足跟进入支具，并且穿上厚的吸汗袜；
3. 将前端护板归位，并且保证其被支具外壳边缘扣住；
4. 将调节带插回卡扣，并调至最佳绑定位，合上卡扣锁定最佳调节效果。

### 产品使用须知：

1. 在使用期间请尽量避免开车；
2. 当您爬楼梯、上下人行台阶或是行走在崎岖的路面上时，请加倍小心；
3. 请放慢你的脚步，以适应特殊鞋具带来的不便；
4. 请在专业人士的指导下使用本产品，一旦发生诸如疼痛，肿胀或皮肤刺激等情况请立即致电相关的专业人士，并且通过调节扣减轻支具对您腿部的压力；
5. 切记不要让支具固定过紧，以影响腿部的血液循环，如果发生下列异常情况，如刺痛、灼伤、麻木以及异味请迅速联系相关专业人士。

### 适应症：

本产品适用于稳定的踝部骨折、胫腓骨骨折，可以代替石膏固定，并且对经骨钉固定后的足、踝关节和小腿骨折恢复效果尤其理想；

足腿部各部分的固定压力经扣带系统调节，可免除因受伤带来的足腿部消肿而要更换石膏的烦恼；

使用该支具的患者可经常清洗足腿部的表皮和伤口，或使用外用药；

最后该支具还可用于踝部韧带的康复。

产品有高筒和低筒两种样式：

货号	颜色	规格	尺码（足底长）
BAT0	黑色	XS	订制
BAT1	黑色	S	25 厘米
BAT2	黑色	M	28 厘米
BAT3	黑色	L	30 厘米
BAT4	黑色	XL	订制