

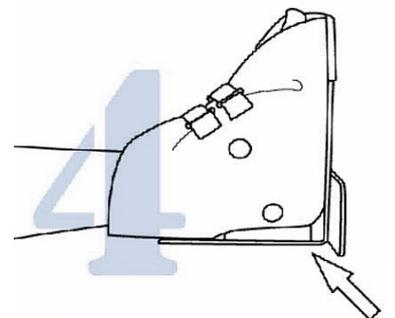
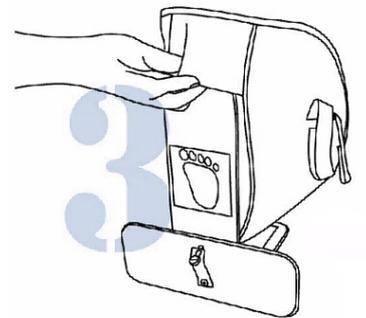


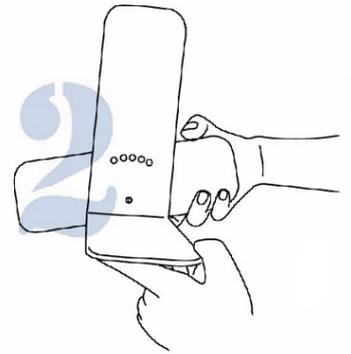

丁字鞋

— Rotation Boot

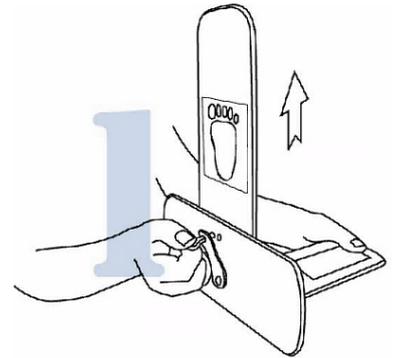

产品简介

本产品专门针对足跟部的褥疮和溃疡，同时考虑到那些长期卧床或是足部尚在康复阶段病人的实际需求而量身定制。为了达到这一效果，产品采用可调节的设计使其有五种不同角度可供选择，硬质塑料板则提供了稳固的支撑，而足跟下方的可拆卸型软质海绵垫使空气流通更顺畅，确保了穿戴的舒适性。

产品使用说明：

1. 按图 1 所示面向上，取下螺母调节角度；
2. 如图 2 选择合适角度，用螺母固定；
3. 依图 3 所示套入支撑架；
4. 据图 4 如果需要可将方形海绵垫置于脚踝下方。

禁忌症：足部皮肤有破损、过敏及创伤时禁用。

注意事项：

1. 本产品应在医生指导下使用。
2. 支具为均码设计，不分左右。
3. 本产品不直接接触人体皮肤，使用支具前，应先将伤口包扎，敷以薄衬垫，避免压迫褥疮或神经，以保证患者使用本产品的安全性。
4. 产品一旦污染，请及时清洗，清洗时用温水和肥皂水手洗，漂净后以毛巾包住吸去多余水份(勿拧)，放置于通风处晾干。请勿使用漂白剂及纺织品柔软剂。
5. 使用产品时，随时观察足趾的血液循环是否良好，如足趾是否青紫、肿胀，足趾活动是否正常，若发现异常，应请医生及时调整海绵套的松紧度，并停止使用支具。
6. 支具应贮存在相对湿度不大于 80%、无腐蚀气体和通风良好的室内。

达科国际贸易（上海）有限公司
中国上海市沪闵路 3458 弄 128 号
电话 021-64892863
传真 021-64892449
www.darco-china.com.cn