

# 足趾固定带


—— DARCO TAS<sup>®</sup> Toe Alignment Splint



1. 低弧度设计的弹性绑带既方便使用者穿着休闲鞋，又能防滑倒
2. 趾部绑带柔软且不刺激皮肤
3. T 型绑带有利足趾固定便于术后康复
4. 采用统一尺码
5. 所用材料不含乳胶


足趾固定带是一款专门针对趾外翻，小趾囊炎以及槌状趾等病症的术后足趾康复固定产品。

## 趾外翻使用方法

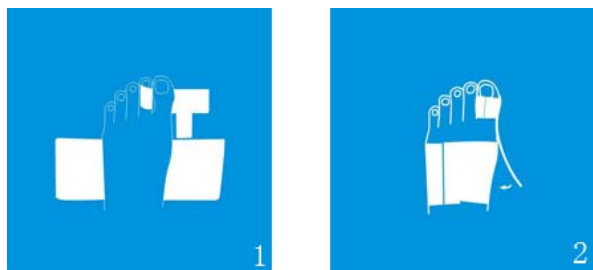

1. 将宽绑带和 T 型绑带置于足底的如图位置；
2. 依次包住，并将 T 型绑带固定在宽绑带上。

## 小趾囊炎使用方法

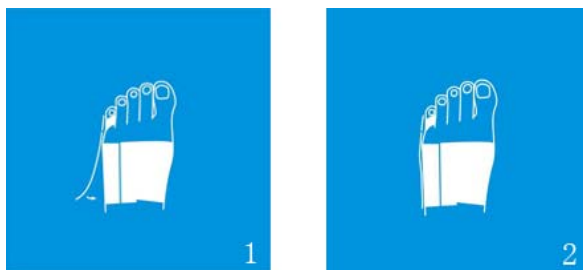

1. 将宽绑带和 T 型绑带如图所示固定在足部；
2. 将 T 型绑带固定在宽绑带上。

## 槌状趾使用方法



1. 将宽绑带置于足底的如图位置，并包住；
2. 以 T 型绑带包住患有槌状趾的病趾；
3. 将 T 型绑带扣在宽绑带上，并如图所示地扣住其它几处即可。

货号	全名	尺寸	颜色
TAS	足趾固定带	统码	白色